

## Instruções de uso

### Cânula de Punção Total Life

**Registro/Notificação ANVISA n°:** 81231550005

**Introdução:** As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis, nem tem a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos.

**Indicação de Uso:** A Cânula de Punção Total Life tem a finalidade de punção para procedimentos de nefrostomia percutânea, punção de cisto, acesso tecidual profundo e todas as outras aplicações percutâneas.

**Princípio de funcionamento:** A Cânula de Punção Total Life tem como princípio de funcionamento facilitar o acesso tecidual em procedimentos de nefrostomia percutânea, punção de cisto, acesso ao tecido mais profundo e outras.

### **Modo de Uso do Produto:**

Remova a Cânula da bainha;  
Localize a área onde a punção será feita pela cânula intraperitoneal (I.P);  
Penetre com cuidado e evite o risco de laceração de vaso e alcance os pontos sem excessivos desvios  
A ponta aumenta a visibilidade sobre a fluoroscopia e garante a localização da ponta da Cânula.

### **Advertências e Precauções:**

Fabricante recomenda uso único.

**Contraindicações:** Pacientes que apresentem hipersensibilidade a composição do material de fabricação do produto.

### **Condições de Armazenamento e transporte:**

Armazenar e transportar em temperatura de 25°C a 10°C e umidade de +ou- 45%

**Apresentação comercial:** A Cânula de Punção Total Life está disponível em embalagem primária de papel filme de Polietileno (PE) mais papel grau cirúrgico contendo uma unidade do produto. Posteriormente é acondicionado em caixa de papelão (celulose).

**Método de Esterilização:** Óxido de Etileno.

**Descarte do produto:** A forma de descarte do produto deve seguir o regulamento técnico de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, conforme descrito na resolução RDC N° 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018

### **Detentor do registro:**

Total Life Comércio de Produtos Médico Hospitalar LTDA  
Endereço: Rua Arnaldo Roque Brisque, 80 – Vista Alegre – Vinhedo/SP – CEP: 13.285-423  
Resp. Técnica: Juliana Luz Baruta CROSP: 82941.

### **Fabricado por:**

Shanghai Kindly Medical Instruments Co. LTD.

Endereço: N° 925, Jinyuan Yi Road, Jiading District, 201803 – Shanghai – China.