

## Instruções de uso

---

### Kit Introdutor Hidrofílico Total Life II

Registro/Notificação ANVISA nº: 81231550016

**Introdução:** As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis, nem tem a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos.

**Indicação de Uso:** O Kit Introdutor Hidrofílico Total Life destina-se à introdução de balões, cateter com extremidade fechada e cateteres que não tenham extremidade distal cônica, ou outros dispositivos no sistema circulatório periférico.

**Princípio de funcionamento:** O Kit Introdutor Hidrofílico Total Life foi concebido por agir como uma bainha introdutora, na introdução de cateteres, balões e outros. A bainha é utilizada para introdução de cateteres, já o dilatador permite a movimentação de ambos tanto da bainha quanto do dilatador. O Fio guia hidrofílico é responsável por guiar a superfície do cateter e a cânula facilita a inserção do fio guia.

**Modo de Uso do Produto:** A punção e a introdução do cateter no mesmo são executadas com a técnica de Seldinger, conforme as etapas a seguir:

- 1- O paciente é colocado em posição de Trendelenburg modificada com a face para direção diferente do vaso canulado.
- 2- No local planejado para punção, a pele deve ser desinfetada e coberta com toalhas estéreis.
- 3- O vaso é puncionado com uma cânula
- 4- O Fio Guia Hidrofílico é introduzido no lúmen do vaso através da cânula, e então a cânula é removida do vaso
- 5- O dilatador do guia com bainha valvulada é introduzido no vaso; movimentos giratórios facilitam a introdução do dilatador
- 6- O Guia Hidrofílico e o dilatador são removidos do vaso. A bainha Valvulada permanece no mesmo servindo para introdução ou troca de cateter.

### **Advertências e Precauções:**

Fabricante recomenda o uso único.

**Contraindicações:** Não se aplica.

**Condições de Armazenamento e transporte:** Armazenar e transportar em temperatura entre 25°C e 40°C e umidade menor que 80%.

**Apresentação comercial:** O Kit Introdutor Hidrofílico Total Life está disponível em embalagem primária de policloreto de Vinila (PVC) na forma de blister mais papel grau cirúrgico contendo uma unidade do produto. Posteriormente é acondicionado em caixa de papelão contendo 10 unidades

**Método de Esterilização:** Óxido de Etileno.

**Descarte do produto:** A forma de descarte do produto deve seguir o regulamento técnico de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, conforme descrito na resolução RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018

### **Detentor do registro:**

Total Life Comércio de Produtos Médico Hospitalar LTDA  
Endereço: Rua Arnaldo Roque Brisque, 80 – Vista Alegre – Vinhedo/SP – CEP: 13.285-423  
Resp. Técnica: Juliana Luz Baruta CROSP: 82941.

### **Fabricado por:**

Shanghai Kindly Medical Instruments Co. LTD.

Endereço: N° 925, Jinyuan Yi Road, Jiading District, 201803 – Shanghai – China.