

Instruções de uso

Cânula de Huber Total Life

Registro ANVISA nº: 81231550060

Introdução: As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis, nem tem a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos.

Indicação de Uso: A Cânula de Huber Total Life é indicada para punção de reservatório, para infusão de quimioterápicos, nutrição parental, tratamento da dor, coleta ou infusão de sangue.

Princípio de funcionamento: A Cânula de Huber Total Life possui aleta para fixação, extensão com conexão luer lock e clamp que asseguram melhor manuseabilidade ao profissional e conforto para o paciente, preservando assim a rede venosa periférica e reduzindo a troca regular de cateteres periféricos.

Modo de Uso do Produto: Utilize técnicas assépticas durante os procedimentos descritos abaixo: isto inclui o uso de luvas, máscara, campos e instrumentos estéreis.

-Posicione o paciente em decúbito dorsal com a cabeça virada para o lado oposto ao da punção.

-Faça uma desinfecção no local de punção. Observe se o local não apresenta sinais de infecção.

-Preencha a cânula em toda a sua extensão com solução salina com o objetivo de expelir o ar e testar a integridade do produto.

-Localize o reservatório através de palpação.

-Mantenha o reservatório firme entre dois dedos.

-Introduza a cânula no centro do reservatório, perpendicularmente à pele.

-Atravesse lentamente a pele, o septo até que a cânula toque a base do reservatório.

-Fixe a cânula na pele com curativo transparente.

-Abra a pinça e inicie a infusão lenta e suavemente.

-Ao final da infusão, lave e preencha o cateter com solução. (de acordo com o protocolo do hospital).

-Retire a cânula.

Advertências e Precauções:

O material é de uso único. Não reesterilizar e não reutilizar.

Não utilizar o produto com prazo de validade vencida, ou se a embalagem estiver

danificada.

O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

Contraindicações: Pacientes que apresentem hipersensibilidade à composição do material de fabricação do produto.

Condições de Armazenamento e transporte: Armazenar e transportar em temperatura de 25°C a 40°C e umidade menor que 80%.

Apresentação comercial: A Cânula de Huber Total Life está disponível em embalagem primária de papel filme de polietileno (PE) mais papel grau cirúrgico contendo uma unidade do produto. Posteriormente é acondicionado em caixa de papelão (Celulose).

Método de esterilização: Óxido de Etileno.

Descarte do produto: A forma de descarte do produto deve seguir o regulamento técnico de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, conforme descrito na resolução RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Importado e distribuído por:

Total Life Comércio de Produtos Médico Hospitalar LTDA Endereço: Rua Arnaldo Roque Brisque, 80 – Vista Alegre – Vinhedo/SP – CEP: 13.285-423

Fabricado por:

Addr: Nº 925, Jinyuan Yi Road, Jiading District, 201803 – Shanghai – China. Shanghai Kindly Medical Instruments Co. LTD.