

INSTRUÇÕES DE USO

Cateter Guia Total Life



**PRODUTO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO. NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM
ESTIVER ABERTA OU DANIFICADA USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR**

Registro Anvisa N°: 81231550083

1. Indicação de uso

O Cateter Guia deve ser utilizado para introdução intravascular de dispositivos de intervenção/diagnóstico na vasculatura coronária.

2. Modelos comerciais

Modelo	Formato da ponta	Diâmetro	Comprimento	Orifícios laterais
GCEBU205F	EBU 2.0 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU206F	EBU 2.0 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU207F	EBU 2.0 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU208F	EBU 2.0 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU209F	EBU 2.0 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU205FH	EBU 2.0 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU206FH	EBU 2.0 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU207FH	EBU 2.0 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU208FH	EBU 2.0 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU209FH	EBU 2.0 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU305F	EBU 3.0 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU306F	EBU 3.0 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU307F	EBU 3.0 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU308F	EBU 3.0 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU309F	EBU 3.0 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU305FH	EBU 3.0 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU306FH	EBU 3.0 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU307FH	EBU 3.0 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU308FH	EBU 3.0 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU309FH	EBU 3.0 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU355F	EBU 3.5 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU356F	EBU 3.5 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU357F	EBU 3.5 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU358F	EBU 3.5 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU359F	EBU 3.5 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU355FH	EBU 3.5 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU356FH	EBU 3.5 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU357FH	EBU 3.5 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU358FH	EBU 3.5 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU359FH	EBU 3.5 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU3755F	EBU 3.75 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	Sem orifícios laterais

GCEBU3756F	EBU 3.75 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU3757F	EBU 3.75 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU3758F	EBU 3.75 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU3759F	EBU 3.75 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU3755FH	EBU 3.75 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU3756FH	EBU 3.75 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU3757FH	EBU 3.75 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU3758FH	EBU 3.75 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU3759FH	EBU 3.75 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU405F	EBU 4.0 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU406F	EBU 4.0 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU407F	EBU 4.0 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU408F	EBU 4.0 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU409F	EBU 4.0 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU405FH	EBU 4.0 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU406FH	EBU 4.0 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU407FH	EBU 4.0 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU408FH	EBU 4.0 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU409FH	EBU 4.0 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU455F	EBU 4.5 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU456F	EBU 4.5 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU457F	EBU 4.5 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU458F	EBU 4.5 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU459F	EBU 4.5 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU455FH	EBU 4.5 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU456FH	EBU 4.5 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU457FH	EBU 4.5 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU458FH	EBU 4.5 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU459FH	EBU 4.5 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU505F	EBU 5.0 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU506F	EBU 5.0 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU507F	EBU 5.0 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU508F	EBU 5.0 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU509F	EBU 5.0 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEBU505FH	EBU 5.0 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU506FH	EBU 5.0 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU507FH	EBU 5.0 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	2 orifícios laterais

GCEBU508FH	EBU 5.0 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCEBU509FH	EBU 5.0 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL755F	AL 0.75 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL756F	AL 0.75 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL757F	AL 0.75 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL758F	AL 0.75 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL759F	AL 0.75 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL755FH	AL 0.75 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL756FH	AL 0.75 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL757FH	AL 0.75 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL758FH	AL 0.75 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL759FH	AL 0.75 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL105F	AL 1.0 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL106F	AL 1.0 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL107F	AL 1.0 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL108F	AL 1.0 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL109F	AL 1.0 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL105FH	AL 1.0 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL106FH	AL 1.0 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL107FH	AL 1.0 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL108FH	AL 1.0 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL109FH	AL 1.0 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL155F	AL 1.5 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL156F	AL 1.5 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL157F	AL 1.5 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL158F	AL 1.5 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL159F	AL 1.5 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL155FH	AL 1.5 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL156FH	AL 1.5 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL157FH	AL 1.5 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL158FH	AL 1.5 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL159FH	AL 1.5 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL205F	AL 2.0(AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL206F	AL 2.0(AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL207F	AL 2.0(AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL208F	AL 2.0(AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL209F	AL 2.0(AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais

GCAL205FH	AL 2.0(AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL206FH	AL 2.0(AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL207FH	AL 2.0(AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL208FH	AL 2.0(AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL209FH	AL 2.0(AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL255F	AL 2.5 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL256F	AL 2.5 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL257F	AL 2.5 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL258F	AL 2.5 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL259F	AL 2.5 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL255FH	AL 2.5 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL256FH	AL 2.5 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL257FH	AL 2.5 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL258FH	AL 2.5 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL259FH	AL 2.5 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL305F	AL 3.0 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL306F	AL 3.0 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL307F	AL 3.0 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL308F	AL 3.0 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL309F	AL 3.0 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL305FH	AL 3.0 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL306FH	AL 3.0 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL307FH	AL 3.0 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL308FH	AL 3.0 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL309FH	AL 3.0 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL405F	AL 4.0 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL406F	AL 4.0 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL407F	AL 4.0 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL408F	AL 4.0 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL409F	AL 4.0 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAL405FH	AL 4.0 (AMPLATZ LEFT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL406FH	AL 4.0 (AMPLATZ LEFT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL407FH	AL 4.0 (AMPLATZ LEFT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL408FH	AL 4.0 (AMPLATZ LEFT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCAL409FH	AL 4.0 (AMPLATZ LEFT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR105F	AR (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR106F	AR (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais

GCAR107F	AR (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR108F	AR (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR109F	AR (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR105FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR106FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR107FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR108FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR109FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR205F	AR (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR206F	AR (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR207F	AR (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR208F	AR (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR209F	AR (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR205FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR206FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR207FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR208FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR209FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR305F	AR (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR306F	AR (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR307F	AR (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR308F	AR (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR309F	AR (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCAR305FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR306FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR307FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR308FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCAR309FH	AR (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL205F	JL 2.0 (JUDKINS LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL206F	JL 2.0 (JUDKINS LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL207F	JL 2.0 (JUDKINS LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL208F	JL 2.0 (JUDKINS LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL209F	JL 2.0 (JUDKINS LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL305F	JL 3.0 (JUDKINS LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL306F	JL 3.0 (JUDKINS LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL307F	JL 3.0 (JUDKINS LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL308F	JL 3.0 (JUDKINS LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais

GCJL309F	JL 3.0 (JUDKINS LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL355F	JL 3.5 (JUDKINS LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL356F	JL 3.5 (JUDKINS LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL357F	JL 3.5 (JUDKINS LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL358F	JL 3.5 (JUDKINS LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL359F	JL 3.5 (JUDKINS LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL355FH	JL 3.5 (JUDKINS LEFT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL356FH	JL 3.5 (JUDKINS LEFT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL357FH	JL 3.5 (JUDKINS LEFT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL358FH	JL 3.5 (JUDKINS LEFT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL359FH	JL 3.5 (JUDKINS LEFT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL405F	JL 4.0 (JUDKINS LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL406F	JL 4.0 (JUDKINS LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL407F	JL 4.0 (JUDKINS LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL408F	JL 4.0 (JUDKINS LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL409F	JL 4.0 (JUDKINS LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL405FH	JL 4.0 (JUDKINS LEFT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL406FH	JL 4.0 (JUDKINS LEFT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL407FH	JL 4.0 (JUDKINS LEFT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL408FH	JL 4.0 (JUDKINS LEFT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL409FH	JL 4.0 (JUDKINS LEFT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL455F	JL 4.5 (JUDKINS LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL456F	JL 4.5 (JUDKINS LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL457F	JL 4.5 (JUDKINS LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL458F	JL 4.5 (JUDKINS LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL459F	JL 4.5 (JUDKINS LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL505F	JL 5.0 (JUDKINS LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL506F	JL 5.0 (JUDKINS LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL507F	JL 5.0 (JUDKINS LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL508F	JL 5.0 (JUDKINS LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL509F	JL 5.0 (JUDKINS LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL505FH	JL 5.0 (JUDKINS LEFT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL506FH	JL 5.0 (JUDKINS LEFT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL507FH	JL 5.0 (JUDKINS LEFT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL508FH	JL 5.0 (JUDKINS LEFT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL509FH	JL 5.0 (JUDKINS LEFT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCJL605F	JL 6.0 (JUDKINS LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais

GCJL606F	JL 6.0 (JUDKINS LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL607F	JL 6.0 (JUDKINS LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL608F	JL 6.0 (JUDKINS LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJL609F	JL 6.0 (JUDKINS LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR305F	JR 3.0 (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR306F	JR 3.0 (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR307F	JR 3.0 (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR308F	JR 3.0 (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR309F	JR 3.0 (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR355F	JR 3.5 (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR356F	JR 3.5 (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR357F	JR 3.5 (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR358F	JR 3.5 (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR359F	JR 3.5 (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR405F	JR 4.0 (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR406F	JR 4.0 (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR407F	JR 4.0 (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR408F	JR 4.0 (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR409F	JR 4.0 (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR405FH	JR 4.0 (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR406FH	JR 4.0 (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR407FH	JR 4.0 (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR408FH	JR 4.0 (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR409FH	JR 4.0 (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR455F	JR 4.5 (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR456F	JR 4.5 (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR457F	JR 4.5 (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR458F	JR 4.5 (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR459F	JR 4.5 (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR455FH	JR 4.5 (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR456FH	JR 4.5 (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR457FH	JR 4.5 (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR458FH	JR 4.5 (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR459FH	JR 4.5 (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR505F	JR 5.0 (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR506F	JR 5.0 (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR507F	JR 5.0 (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais

GCJR508F	JR 5.0 (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR509F	JR 5.0 (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR505FH	JR 5.0 (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR506FH	JR 5.0 (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR507FH	JR 5.0 (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR508FH	JR 5.0 (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR509FH	JR 5.0 (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCJR605F	JR 6.0 (AMPLATZ RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR606F	JR 6.0 (AMPLATZ RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR607F	JR 6.0 (AMPLATZ RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR608F	JR 6.0 (AMPLATZ RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCJR609F	JR 6.0 (AMPLATZ RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL305F	FL 3.0 (FEMORAL LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL306F	FL 3.0 (FEMORAL LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL307F	FL 3.0 (FEMORAL LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL308F	FL 3.0 (FEMORAL LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL309F	FL 3.0 (FEMORAL LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL355F	FL 3.5 (FEMORAL LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL356F	FL 3.5 (FEMORAL LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL357F	FL 3.5 (FEMORAL LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL358F	FL 3.5 (FEMORAL LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL359F	FL 3.5 (FEMORAL LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL405F	FL 4.0 (FEMORAL LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL406F	FL 4.0 (FEMORAL LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL407F	FL 4.0 (FEMORAL LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL408F	FL 4.0 (FEMORAL LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL409F	FL 4.0 (FEMORAL LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL455F	FL 4.5 (FEMORAL LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL456F	FL 4.5 (FEMORAL LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL457F	FL 4.5 (FEMORAL LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL458F	FL 4.5 (FEMORAL LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL459F	FL 4.5 (FEMORAL LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL505F	FL 5.0 (FEMORAL LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL506F	FL 5.0 (FEMORAL LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL507F	FL 5.0 (FEMORAL LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL508F	FL 5.0 (FEMORAL LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL509F	FL 5.0 (FEMORAL LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais

GCFL605F	FL 6.0 (FEMORAL LEFT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL606F	FL 6.0 (FEMORAL LEFT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL607F	FL 6.0 (FEMORAL LEFT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL608F	FL 6.0 (FEMORAL LEFT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFL609F	FL 6.0 (FEMORAL LEFT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR305F	FR 3.0 (FEMORAL RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR306F	FR 3.0 (FEMORAL RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR307F	FR 3.0 (FEMORAL RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR308F	FR 3.0 (FEMORAL RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR309F	FR 3.0 (FEMORAL RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR355F	FR 3.5 (FEMORAL RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR356F	FR 3.5 (FEMORAL RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR357F	FR 3.5 (FEMORAL RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR358F	FR 3.5 (FEMORAL RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR359F	FR 3.5 (FEMORAL RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR405F	FR 4.0 (FEMORAL RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR406F	FR 4.0 (FEMORAL RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR407F	FR 4.0 (FEMORAL RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR408F	FR 4.0 (FEMORAL RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR409F	FR 4.0 (FEMORAL RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR455F	FR 4.5 (FEMORAL RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR456F	FR 4.5 (FEMORAL RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR457F	FR 4.5 (FEMORAL RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR458F	FR 4.5 (FEMORAL RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR459F	FR 4.5 (FEMORAL RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR505F	FR 5.0 (FEMORAL RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR506F	FR 5.0 (FEMORAL RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR507F	FR 5.0 (FEMORAL RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR508F	FR 5.0 (FEMORAL RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR509F	FR 5.0 (FEMORAL RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR605F	FR 6.0 (FEMORAL RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR606F	FR 6.0 (FEMORAL RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR607F	FR 6.0 (FEMORAL RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR608F	FR 6.0 (FEMORAL RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCFR609F	FR 6.0 (FEMORAL RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCLCB5F	LCB (LEFT CORONARY BYPASS)	5F	100cm	Sem orifícios laterais

GCLCB6F	LCB (LEFT CORONARY BYPASS)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCLCB7F	LCB (LEFT CORONARY BYPASS)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCLCB8F	LCB (LEFT CORONARY BYPASS)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCLCB9F	LCB (LEFT CORONARY BYPASS)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCLCB5FH	LCB (LEFT CORONARY BYPASS)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCLCB6FH	LCB (LEFT CORONARY BYPASS)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCLCB7FH	LCB (LEFT CORONARY BYPASS)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCLCB8FH	LCB (LEFT CORONARY BYPASS)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCLCB9FH	LCB (LEFT CORONARY BYPASS)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCRCB5F	RCB (RIGHT CORONARY BYPASS)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRCB6F	RCB (RIGHT CORONARY BYPASS)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRCB7F	RCB (RIGHT CORONARY BYPASS)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRCB8F	RCB (RIGHT CORONARY BYPASS)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRCB9F	RCB (RIGHT CORONARY BYPASS)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRCB5FH	RCB (RIGHT CORONARY BYPASS)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCRCB6FH	RCB (RIGHT CORONARY BYPASS)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCRCB7FH	RCB (RIGHT CORONARY BYPASS)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCRCB8FH	RCB (RIGHT CORONARY BYPASS)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCRCB9FH	RCB (RIGHT CORONARY BYPASS)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS305F	SBS 3.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS306F	SBS 3.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS307F	SBS 3.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS308F	SBS 3.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS309F	SBS 3.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais

GCSBS305FH	SBS 3.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS306FH	SBS 3.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS307FH	SBS 3.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS308FH	SBS 3.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS309FH	SBS 3.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS355F	SBS 3.5 (SUPER BACK UP SUPPORT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS356F	SBS 3.5 (SUPER BACK UP SUPPORT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS357F	SBS 3.5 (SUPER BACK UP SUPPORT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS358F	SBS 3.5 (SUPER BACK UP SUPPORT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS359F	SBS 3.5 (SUPER BACK UP SUPPORT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS355FH	SBS 3.5 (SUPER BACK UP SUPPORT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS356FH	SBS 3.5 (SUPER BACK UP SUPPORT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS357FH	SBS 3.5 (SUPER BACK UP SUPPORT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS358FH	SBS 3.5 (SUPER BACK UP SUPPORT)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS359FH	SBS 3.5 (SUPER BACK UP SUPPORT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS405F	SBS 4.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS406F	SBS 4.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS407F	SBS 4.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS408F	SBS 4.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS409F	SBS 4.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSBS405FH	SBS 4.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS406FH	SBS 4.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS407FH	SBS 4.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCSBS408FH	SBS 4.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	8F	100cm	2 orifícios laterais

GCSBS409FH	SBS 4.0 (SUPER BACK UP SUPPORT)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCRBU355F	RBU 3.5 (BACKUP SUPPORT RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRBU356F	RBU 3.5 (BACKUP SUPPORT RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRBU357F	RBU 3.5 (BACKUP SUPPORT RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRBU358F	RBU 3.5 (BACKUP SUPPORT RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRBU359F	RBU 3.5 (BACKUP SUPPORT RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRBU405F	RBU 4.0 (BACKUP SUPPORT RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRBU406F	RBU 4.0 (BACKUP SUPPORT RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRBU407F	RBU 4.0 (BACKUP SUPPORT RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRBU408F	RBU 4.0 (BACKUP SUPPORT RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCRBU409F	RBU 4.0 (BACKUP SUPPORT RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR355F	SCR 3.5 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR356F	SCR 3.5 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR357F	SCR 3.5 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR358F	SCR 3.5 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR359F	SCR 3.5 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR405F	SCR 4.0 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR406F	SCR 4.0 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR407F	SCR 4.0 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR408F	SCR 4.0 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR409F	SCR 4.0 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR505F	SCR 5.0 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR506F	SCR 5.0 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR507F	SCR 5.0 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais

GCSCR508F	SCR 5.0 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCSCR509F	SCR 5.0 (SHEPHERD'S CROOK RIGHT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR355F	ECR 3.5 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR356F	ECR 3.5 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR357F	ECR 3.5 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR358F	ECR 3.5 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR359F	ECR 3.5 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR405F	ECR 4.0 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR406F	ECR 4.0 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR407F	ECR 4.0 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR408F	ECR 4.0 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR409F	ECR 4.0 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR455F	ECR 4.5 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR456F	ECR 4.5 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR457F	ECR 4.5 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR458F	ECR 4.5 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR459F	ECR 4.5 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR505F	ECR 5.0 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR506F	ECR 5.0 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR507F	ECR 5.0 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR508F	ECR 5.0 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCECR509F	ECR 5.0 (RIGHT CORONARY BACKUP SUPPORT)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCHS5F	HS (HOCKEY SICKY)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCHS6F	HS (HOCKEY SICKY)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCHS7F	HS (HOCKEY SICKY)	7F	100cm	Sem orifícios laterais

GCHS8F	HS (HOCKEY SICKY)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCHS9F	HS (HOCKEY SICKY)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCHS5FH	HS (HOCKEY SICKY)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCHS6FH	HS (HOCKEY SICKY)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCHS7FH	HS (HOCKEY SICKY)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCHS8FH	HS (HOCKEY SICKY)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCHS9FH	HS (HOCKEY SICKY)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCXB305F	XB3.0 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB306F	XB3.0 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB307F	XB3.0 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB308F	XB3.0 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB309F	XB3.0 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB355F	XB3.5 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB356F	XB3.5 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB357F	XB3.5 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB358F	XB3.5 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB359F	XB3.5 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB405F	XB4.0 (EXTRA BACKUP)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB406F	XB4.0 (EXTRA BACKUP)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB407F	XB4.0 (EXTRA BACKUP)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB408F	XB4.0 (EXTRA BACKUP)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCXB409F	XB4.0 (EXTRA BACKUP)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCIM5F	IM (INTERNAL MAMMARY)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCIM6F	IM (INTERNAL MAMMARY)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCIM7F	IM (INTERNAL MAMMARY)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCIM8F	IM (INTERNAL MAMMARY)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCIM9F	IM (INTERNAL MAMMARY)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCIM5FH	IM (INTERNAL MAMMARY)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCIM6FH	IM (INTERNAL MAMMARY)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCIM7FH	IM (INTERNAL MAMMARY)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCIM8FH	IM (INTERNAL MAMMARY)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCIM9FH	IM (INTERNAL MAMMARY)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCMAC305F	MAC 3.0 (MULTI-AORTIC CURVE)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCMAC306F	MAC 3.0 (MULTI-AORTIC CURVE)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCMAC307F	MAC 3.0 (MULTI-AORTIC CURVE)	7F	100cm	Sem orifícios laterais

GCMAC308F	MAC 3.0 (MULTI-AORTIC CURVE)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCMAC309F	MAC 3.0 (MULTI-AORTIC CURVE)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCMP5F	MP (MULTIPURPOSE)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCMP6F	MP (MULTIPURPOSE)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCMP7F	MP (MULTIPURPOSE)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCMP8F	MP (MULTIPURPOSE)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCMP9F	MP (MULTIPURPOSE)	9F	100cm	Sem orifícios laterais
GCMP5FH	MP (MULTIPURPOSE)	5F	100cm	2 orifícios laterais
GCMP6FH	MP (MULTIPURPOSE)	6F	100cm	2 orifícios laterais
GCMP7FH	MP (MULTIPURPOSE)	7F	100cm	2 orifícios laterais
GCMP8FH	MP (MULTIPURPOSE)	8F	100cm	2 orifícios laterais
GCMP9FH	MP (MULTIPURPOSE)	9F	100cm	2 orifícios laterais
GCEG5F	EG (EL GAMAL)	5F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEG6F	EG (EL GAMAL)	6F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEG7F	EG (EL GAMAL)	7F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEG8F	EG (EL GAMAL)	8F	100cm	Sem orifícios laterais
GCEG9F	EG (EL GAMAL)	9F	100cm	Sem orifícios laterais

3. Instruções para uso

- 1) Selecione um cateter-guia adequado de acordo com a lesão e não utilize embalagens abertas ou danificadas.
- 2) Retire lentamente o cateter guia da embalagem primária. Tenha cuidado para evitar danificar ou dobrar o ponta do cateter.
- 3) Irrigue o lúmen interno do cateter-guia com solução salina de heparina antes de usar.
- 4) Introduza o cateter guia no sistema vascular ao longo do fio guia através da bainha.
Sob fluoroscopia, avance o cateter guia ao longo do fio-guia até atingir a posição alvo.
- 5) Após o cateter guia atingir a posição desejada, proceda a posteriores procedimentos diagnósticos ou terapêuticos medidas.

4. Advertências

5. Precauções

- 1) Este produto é limitado a um único paciente e não pode ser esterilizado e/ou reutilizado;
- 2) Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- 3) Produtos vencidos são estritamente proibidos;
- 4) O encaixe do cateter é uma junta cônica externa padrão de 6% e pode ser usada com junta cônica interna padrão de 6%;
- 5) Os produtos utilizados devem ser tratados pelas unidades médicas como resíduos hospitalares.

6. Condições de armazenamento e transporte

Armazenar em local em que não seja exposto ao sol e chuva. Deve ser armazenado em ambiente com sombra, seco e limpo. Armazenar em temperatura de 10 à 30°C.

7. Contraindicações

Pacientes com alergia a meio de contraste.

8. Efeitos adversos e riscos

- Hemorragia ou hematoma;
- Infecção;

- Embolismo;
- Perfuração;
- Espasmo do vaso;
- Oclusão vascular

9. Simbologia

Símbolo	Descrição
	Não reutilizar
	Esterilizado por Óxido de Etileno
	Consulte as Instruções de uso

Detentor do registro:

Total Life Comércio de Produtos Médico Hospitalar LTDA

Rua Arnaldo Roque Birsque, 80 - Vinhedo- SP – 13.285-423

Responsável Técnico:

Juliana Luz Baruta – CRO/SP: 82941

Fabricante responsável:

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd

Endereço: No. 925 Jinyuan yi Road, 201803 Shanghai, P.R.C.

Juliana Luz Baruta
Responsável Legal e Técnica