

Fio Guia Teflonado Total Life

Registro ANVISA n°: 812315550003

Introdução: Às técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis, nem tem a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos.

Indicação de Uso: O Fio Guia Teflonado Total Life é utilizado para facilitar a colocação de dispositivos durante procedimentos diagnósticos e intervencionistas.

Princípio de funcionamento: O Fio Guia Teflonado Total Life tem por finalidade direcionar um cateter para o local anatômico desejado, durante um diagnóstico ou procedimentos intervencionistas. Este produto é feito em aço cirúrgico inoxidável, com cobertura PTFE e na sua extremidade possui um conector.

Modo de Uso do Produto: Leia as instruções de uso do fabricante antes de utilizar o produto.

Anexe uma seringa no porta -lúmen; Rode a seringa no sentido horário; Injete salina dentro do lúmen; Jogue a seringa no dispense.

Direção para uso: Puncione o vaso, insira a parte final do fio guia através da cânula e dentro do vaso; avance o posicionador até 2-3mm da porta estendendo até a porta;

Insira o Fio dentro do eixo e através da cânula; remova a cânula deixando o fio guia dentro do lúmen do vaso; Passe o dilatador ou cateter sobre o fio guia diretamente dentro do vaso; Cuidadosamente remova o fio guia deixando o cateter no lugar.

Advertências e Precauções:

- O material é de uso único. Não reesterilizar e não reutilizar.

- Não utilizar o produto com prazo de validade vencida, ou se a embalagem estiver danificada.
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina.

Contraindicações: Não se aplica.

Condições de Armazenamento e transporte: Armazenar e transportar em temperatura 25°C a 40°C e umidade relativa do ar menor que 80%.

Apresentação comercial: O Fio Guia Teflonado Total Life está disponível em embalagem primária de polietileno mais papel grau cirúrgico, contendo uma unidade do produto. Posteriormente é acondicionado em caixa de papelão (celulose).

Método de esterilização: Óxido de Etileno.

Descarte do produto: A forma de descarte do produto deve seguir o regulamento técnico de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, conforme descrito na resolução RDC N° 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Importado e distribuído por:

Total Life Comércio de Produtos Médico Hospitalar LTDA
Endereço: Rua Arnaldo Roque Brisque, 80 – Vista Alegre – Vinhedo/SP – CEP:
13.285-423

Fabricado por: Shanghai Kindly Enterprise Development Group Medical
Instruments CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Addr:N° 925, Jinyuan Yi Road, Jiading District, 201803 – Shanghai – China.